

ANIOS RL

CE

Aclarador
Lubricante
del instrumental



- Aclarador Lubricante con activador de secado.

- Muy buena compatibilidad con polysulfone.

- Particularmente recomendado combinado con ANIOSYME DLM.


- Se utiliza en todo tipo de máquina.

INDICACIONES

Enjuague líquido neutro con activación de la operación de secado. Específicamente estudiado para los túneles de lavado y las lavadoras automáticas de chorros, equipadas con un recipiente único de enjuague-lubricación.

CARACTERÍSTICAS

- Líquido límpido incolora
- pH del producto puro a 20°C : Aprox. 7
- pH a disolución (0,2%): 7,7
- Densidad a 20°C : Aprox. 1,012

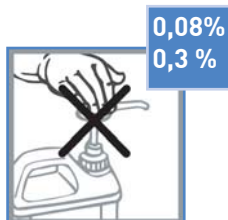

DISOLUCIÓN
AUTOMÁTICA

es decir 0,8 a 3 ml → 1 L

ANIOS RL

Aclarador Lubricante del instrumental

MODO DE EMPLEO

Solución concentrada.

ANIOS RL debe utilizarse diluido a razón de entre 0,08 y 0,3% (es decir, entre 0.8 y 3 ml por litro de agua fría o caliente).

Se recomienda el uso de ANIOS RL para el aclarado con agua osmótica o desmineralizada.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Condensat de óxido de ethylene y de propylene.

Derivados glycolicos.

Alcohol grasso a efecto antiespumante.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Consulte la etiqueta.

Precauciones de uso establecidas de conformidad con la Directiva Europea 99/45/CE.

Almacenamiento : de +5°C a +35°C.

ACONDICIONAMIENTOS

2 bidones de 5 L.....0315.038

Bidón de 10 L.....0315.024

